

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Тест на антитела

иммунохроматография (коллоидное золото)



LEPU MEDICAL



Точность

Высокоочищенные антитела для лучшей точности




Эффективность

Результат тестирования через 15 минут



Удобство

Подходит капиллярная кровь (Из пальца)

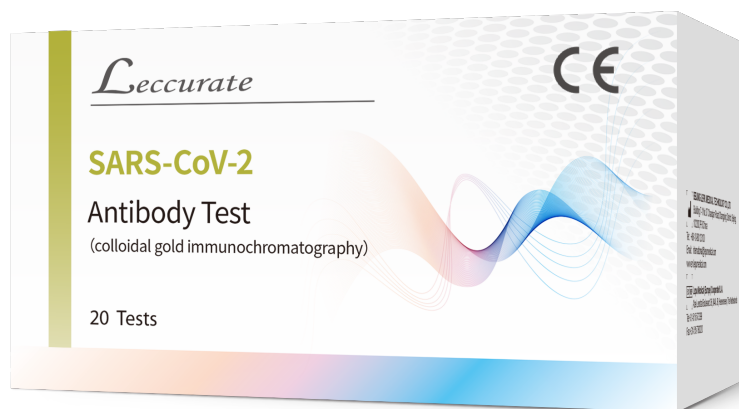




С : линия контроля качества
 G: линия обнаружения IgG
 M: линия обнаружения IgM

Лунка А : образец крови
 Лунка В : раствор


[Тип образца] Цельная кровь / Плазма / Сыворотка
 [Объём образца] 20 мкл / 10 мкл / 10 мкл
 [Время реакции] 15 минут
 [Размер упаковки] 20 тестов в коробке
 [Условия хранения] 4°C ~ 30°C
 [Срок годности] 12 месяцев

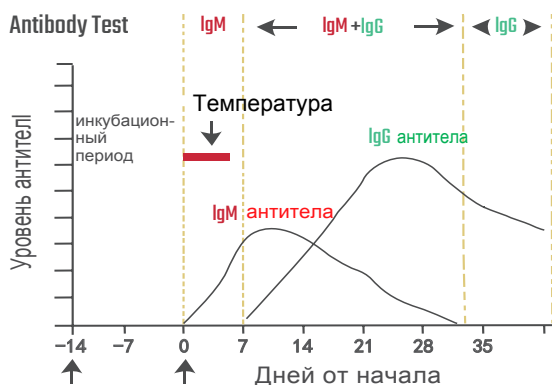


Антитела секретируются после вирусной инвазии. Иммуноглобулин М (IgM) появляется первым, являясь ранним проявлением инфекции. Иммуноглобулин G (IgG) появляется позже, в связи с более специфической и более сильной реакцией организма против вирусной инфекции.

Использование


Шаг 1. Добавить 20 мкл образца цельной крови / 10 мкл образца сыворотки или плазмы в лунку А.

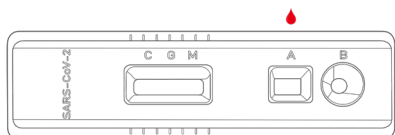

Шаг 2. Добавьте две капли (около 80 мкл) раствора в лунку В и начните отсчет времени.

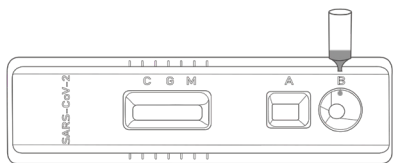

Шаг 3. Результаты теста должны быть оценены в течение 10-20 минут. Не проводите оценку результата после 20 минут.

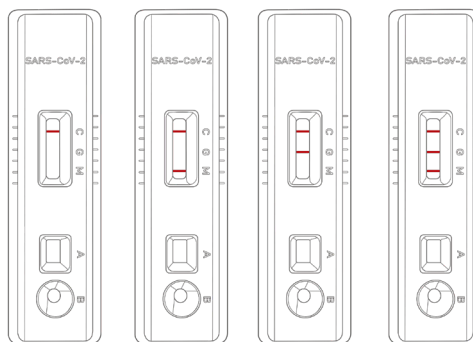

Отрицательный

IgM (+)


IgG (+)

IgM/IgG (+)

M: линия обнаружения IgM

G: линия обнаружения IgG

C : линия контроля качества

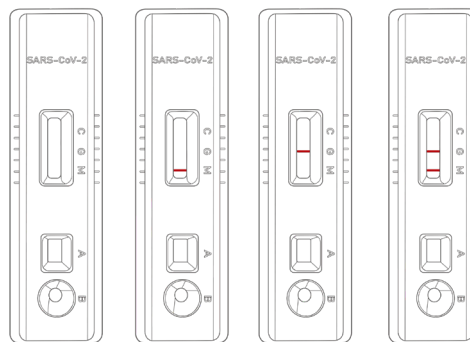

Ошибка

Ошибка

Ошибка

Ошибка

